

Garantie limitée

La garantie couvre tous les vices de fabrication constatés si les instructions du guide d'utilisation sont respectées.

La garantie ne couvre que les aides auditives équipées de la protection Hear clear, installées par le fabricant ou une de ses filiales.

Le fabricant ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, y compris celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages résultant d'une blessure, de l'incapacité à utiliser l'aide auditive, subie par le client ou par un tiers.

Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages ou de défaillances de l'aide auditive causés par un accident ou négligence, utilisation non appropriée, manquement à l'exécution d'une maintenance ou d'un entretien régulier, utilisation non conforme au guide d'utilisation du produit, la modification ou la réparation autre que celles effectuées par le fabricant ou une de ses filiales.

Conseils d'utilisation

- N'essayez pas de nettoyer cette protection, elle doit être changée car elle n'est prévue que pour une seule utilisation.
- Pour bénéficier au maximum de l'efficacité de votre aide auditive et par mesure d'hygiène, changer la protection **toutes les 2 semaines** ou selon les conseils de votre audioprothésiste.



NOT0103-00-FF-ST 01/19

HEAR CLEAR

PROTECTION PARE-CÉRUMEN INTERCHANGEABLE

ÉCOUTEUR

NOTICE D'UTILISATION

Nouveau système de retrait



Barrette jaune



ÉCOUTEUR

Protection Hear Clear Barrette jaune


Votre aide auditive est équipée d'une protection pare-cérumen **Hear Clear** située dans la sortie écouteur.

Elle protège du cérumen, de l'humidité et des corps étrangers.

Utilisez uniquement la **barrette jaune** pour remplacer la protection écouteur Hear Clear en suivant les instructions ci-contre.

ATTENTION : Si la protection pare-cérumen écouteur Hear Clear se déloge de l'aide auditive et venait à tomber dans votre conduit auditif, consultez immédiatement votre audio-prothésiste ou un médecin.

NOUVEAU : Son nouveau système de retrait est compatible avec les anciennes aides auditives.

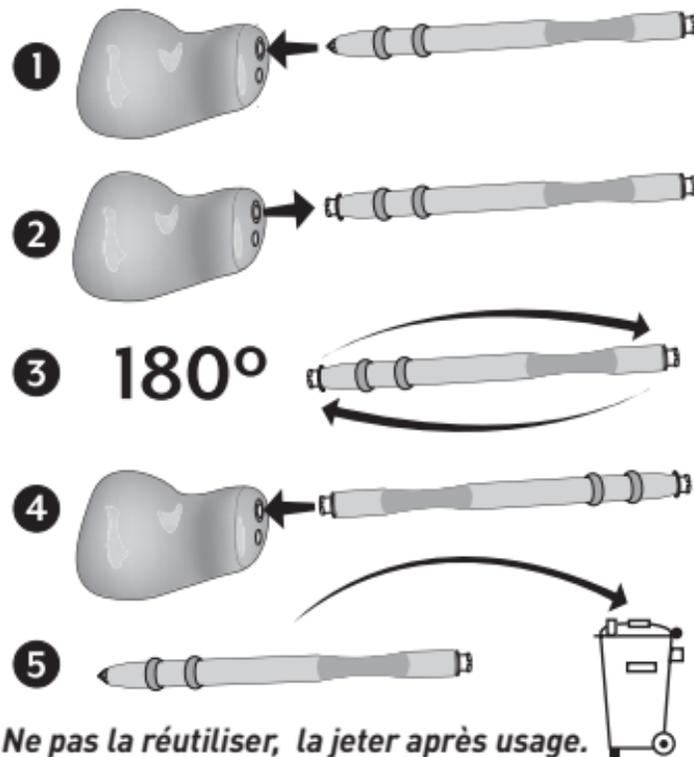

Ne pas la réutiliser, la jeter après usage.